



Suma Med Enzyme

Detergente enzimatico per dispositivi medici

Descrizione

Suma Med Enzyme è un detergente enzimatico delicato appositamente formulato per fornire un'eccellente rimozione dello sporco dagli strumenti medici in condizioni di durezza dell'acqua medio-bassa.

Caratteristiche principali

Suma Med Enzyme è un detergente enzimatico delicato adatto ad essere utilizzato in una vasta gamma di lavastoviglie, tunnel di lavaggio e lavapadelle termiche. Il prodotto è particolarmente adatto per la pulizia dello sporco di strumenti medici, attrezzature per l'anestesia e attrezzature endoscopiche. Contiene un enzima proteolitico per un'eccellente rimozione dello sporco in condizioni di durezza dell'acqua medio-bassa.

Benefici


- Rimuove lo sporco e il sangue essiccato
- La sua formula altamente concentrata garantisce eccellenti costi in uso
- La pulizia con enzimi protegge gli strumenti fatti di materiali sensibili al pH
- Facile da maneggiare, grazie alla pratica confezione

Modalità d'uso

Suma Med Enzyme viene normalmente applicato utilizzando apparecchiature di dosaggio automatiche alla concentrazione di 2-6 ml / iniziando a 20-25 ° C. Inserire la lancia di pescaggio nella tanica del detergente in modo che il prodotto venga correttamente dosato.

Il prodotto può essere dosato anche manualmente. Utilizzare guanti (PVC, nitrile, lattice o neoprene) se il prodotto viene usato manualmente.

I dosaggi effettivi sono determinati in base alle condizioni del sito.

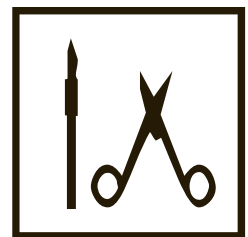

° A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



Suma Med Enzyme

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido incolore

pH (soluzione all'1% a 20°C): 8.5

Peso specifico (20°C): 1.15

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza; sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Proteggere dalla luce.

Solo per uso professionale.

Compatibilità prodotto

Se utilizzato seguendo le modalità d'uso raccomandate, Suma Med Enzyme è adatto per essere utilizzato con i materiali comunemente usati negli ambienti sanitari.