



Diversey

Oxivir Excel CE

Detergente e disinfettante per dispositivi medici non invasivi - Dispositivo Medico Classe IIa

Descrizione

Oxivir Excel CE è un detergente e disinfettante concentrato efficace contro batteri, lieviti e virus. Sviluppato sulla tecnologia brevettata da Diversey del perossido di idrogeno accelerato (AHP). Oxivir Excel CE è destinato all'uso sulle superfici dei dispositivi medici non invasivi.

Caratteristiche principali

- Azione virucida completa in soli 30 secondi
- Azione rapida su un ampio spettro di virus, batteri e lieviti
- Efficace detergente
- Senza profumo
- Non è necessario risciacquare
- Sicuro per l'ambiente, gli utilizzatori e i pazienti, poiché l'ingrediente attivo si scompone in acqua e ossigeno
- Non contiene cloro o alcool

Benefici

- L'estesa efficacia garantisce i massimi livelli di disinfezione. Ampiamente testato rispetto alle norme europee ed efficace contro molteplici agenti patogeni, ha un'indicazione virucida completa che comprende Poliovirus, Adenovirus e Norovirus murino, considerato efficace contro tutti i virus incapsulati come: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus e Coronavirus.
- I brevi tempi di contatto mantengono la superficie umida, assicurando così l'efficacia del disinfettante
- Adatto per l'uso in aree ad alto rischio in ambito sanitario.

Modalità d'uso

Metodo per immersione:

1. Diluire il liquido concentrato come richiesto (vedere la tabella dei dati microbiologici sotto).
2. Rimuovere la contaminazione con un panno umido (sporco grossolano).
3. Immergere completamente il dispositivo medico per il tempo di contatto richiesto (vedere la tabella dei dati microbiologici sotto).
4. Dopo il tempo di contatto, rimuovere il dispositivo medico, asciugarlo con un panno o lasciarlo asciugare all'aria.

Metodo con panno/mop:

1. Diluire il liquido concentrato come richiesto (vedere la tabella dei dati microbiologici sotto).
2. Spruzzare la soluzione sulla superficie del dispositivo medico.
3. Strofinare la superficie del dispositivo medico con un panno pulito e assicurarsi che rimanga bagnata durante il tempo di contatto indicato nella tabella sottostante.
4. Al termine del tempo di contatto, asciugare la superficie con un panno o lasciarla asciugare all'aria.

Dosaggi consigliati*

Per ottenere l'azione disinfettante, seguire il dosaggio raccomandato (vedere la tabella dei dati microbiologici).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



Oxivir Excel CE

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido limpido incolore
Odore:	neutro
pH (tal quale):	0.55
pH (in uso):	< ≈ 2
Peso specifico (20°C):	≈ 1.07
Periodo di validità:	2 anni (consultare la data stampigliata sulla confezione)
Concentrazione:	0.36 % Perossido di idrogeno

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Manipolare seguendo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non mescolare con altri prodotti se non consigliato da Diversey. Conservare nei contenitori originali chiusi, al riparo da temperature estreme. Il prodotto non è destinato a essere riutilizzato. Solo per utenti professionali/specialisti.

Attenzione

Non destinato all'uso su dispositivi medici invasivi. Il prodotto non è destinato all'uso sull'uomo. Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare acqua calda per diluire il prodotto. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Non è destinato all'uso su dializzatori e tubi per dialisi e strumenti critici (chirurgici) che penetrano nei tessuti o invadono il flusso sanguigno. Non va usato su strumenti semicritici che entrano in contatto diretto con mucose intatte e devono essere disinfettati ad alto livello. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. Lavare accuratamente il viso, le mani e la pelle esposta dopo la manipolazione. Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Utilizzare solo con una ventilazione adeguata.

Pericolo. Contiene acido alchilbenzensolfonico (acido dodecilbenzensolfonico).

Indicazioni di pericolo:

- Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi.
- Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
- Può essere corrosivo per i metalli.

Reagisce con sostanze ossidabili.

In caso di incidenti gravi relativi all'uso di Oxivir Excel CE, l'utente deve segnalarli a Diversey Europe Operations BV e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Dispositivi di protezione individuali

Protezione di occhi e viso:	Occhiali o maschere di sicurezza (EN 166). Si raccomanda vivamente l'uso di uno schermo integrale o di un'altra protezione per il viso quando si maneggiano contenitori aperti o se si possono verificare schizzi.
Protezione delle mani:	Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche (EN 374). Verificare le istruzioni relative alla permeabilità e al tempo di penetrazione fornite dal fornitore dei guanti. Considerare le condizioni di utilizzo locali specifiche, come il rischio di schizzi, tagli, tempo di contatto e temperatura. Guanti consigliati per il contatto prolungato: Materiale: gomma butilica - Tempo di penetrazione: ≥ 480min - Spessore del materiale: ≥ 0,7 mm. Guanti consigliati per la protezione dagli schizzi: Materiale: gomma nitrilica - Tempo di penetrazione: ≥ 30min - Spessore del materiale: ≥ 0,4 mm. In accordo con il fornitore di guanti protettivi, si può scegliere un tipo diverso che fornisca una protezione simile.
Protezione del corpo:	Nessun requisito speciale nelle normali condizioni d'uso. Indossare indumenti e stivali resistenti alle sostanze chimiche in caso di esposizione cutanea diretta e/o schizzi (EN 14605).
Protezione delle vie respiratorie	Di norma non è necessaria una protezione delle vie respiratorie. Tuttavia, è necessario evitare l'inalazione di vapori, spruzzi, gas o aerosol.



Oxivir Excel CE

Considerazioni sullo smaltimento

Rifiuti da residui / prodotti inutilizzati: Il contenuto concentrato o l'imballaggio contaminato devono essere smaltiti da un operatore certificato o in base all'autorizzazione del sito. Si sconsiglia l'immissione dei rifiuti nelle fognature. Il materiale di imballaggio pulito è adatto al recupero energetico o al riciclaggio in linea con la legislazione locale. **Catalogo europeo dei rifiuti: 20 01 29*** - detergenti contenenti sostanze pericolose. **Raccomandazione Imballaggio vuoto:** Smaltire rispettando le normative nazionali o locali. **Detergenti adatti:** Acqua, se necessario con detergente

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Nelle condizioni d'uso raccomandate, Oxivir Excel CE è adatto all'uso su superfici come acciaio inossidabile, cromo, vinile, tessuti di nylon, superfici laminate, vetro, gomma, plastiche dure e flessibili (polipropilene, poliuretano, polietilene, PVC acrilico, vetroresina e policarbonato). Si sconsigliano usi diversi da quelli indicati.

Dati microbiologici

Oxivir Excel CE (concentrato)				
PT2 solo medico				
Attività	Test EN (condizioni di sporco)	Tempo di contatto	Concentrazione	ml aggiunti in 1L di acqua
Battericida	EN13727 e EN13697	5 minuti	4%	40 ml
	EN13727 e EN16615 (panno/mop)	1 minuto	2%	20 ml
Lieviticida	EN13624 e EN13697	5 minuti	4.5%	45 ml
	EN13624 e EN16615 (panno/mop)	5 minuti	4%	40 ml
Virucida	EN14476	30 secondi	4%	40 m
		5 minuti	2%	20 ml

Informazioni ambientali

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

Oxivir Excel CE ha ottenuto la certificazione CE 0044 come dispositivo medico classe IIa, per dispositivi medici non invasivi.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.31/01/2025 it-IT (K00378)