



Oxivir Excel Foam CE

Detergente e disinfettante pronto all'uso per le superfici dispositivi medici non invasivi - Dispositivo Medico Classe IIa

Descrizione

Oxivir Excel Foam è un detergente disinfettante altamente concentrato con un ampio spettro di efficacia e basso tempo di contatto. Si basa sulla tecnologia brevettata a base di Perossido di Idrogeno Accelerato (Accelerated Hydrogen Peroxide), Oxivir Excel Foam può essere usato su superfici dure e non porose dei dispositivi medici Classe IIa.

Caratteristiche principali

- Azione virucida completa in soli 30 secondi
- Battericida, virucida, lieviticida
- Pulizia superiore grazie ad un sistema tensioattivo ad alte prestazioni
- Semplice da utilizzare
- Senza profumo
- Non richiede risciacquo
- Più sicuro per l'ambiente, ma anche per gli utenti, poiché i principi attivi si scompongono in acqua e ossigeno
- Privo di alchilfenoletossilati (APE), etossilati di nonilfenolo (NPE) e composti organici volatili (COV)

Benefici

- Ampiamente testato secondo le norme europee: efficace nei confronti di molteplici agenti patogeni, ha un'azione virucida completa che include Poliovirus, Adenovirus e Norovirus murino considerati efficaci contro tutti i virus incapsulati come: HIV, HBV, HCV, influenza, Vaccinia e Coronavirus
- Eccellenti proprietà detergenti, efficace anche per la rimozione del calcare, elimina la necessità di procedere con una pulizia preliminare
- Sicuro per gli utenti senza necessità di utilizzare DPI. Nessuna classificazione di rischio
- La formulazione AHP è delicata su superfici e ne prolungano la vita
- Adatto per l'uso in aree ad alto rischio incluse sale operatorie, unità di terapia intensiva, unità neonatali e camere dei degeniti

Modalità d'uso

Prodotto pronto all'uso, utilizzare tal quale.

Dosaggi consigliati*

Prodotto pronto all'uso, utilizzare tal quale.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



Applicazione

Applicazione Spray:

1. Rimuovere lo sporco grossolano
2. Applicare sulla superficie nebulizzando su un panno oppure direttamente sulla superficie
3. Lasciare agire il tempo necessario per garantire la disinfezione secondo quanto riportato nella sezione relativa ai dati microbiologici
4. Passare con un panno per asciugare o lasciare asciugare all'aria
5. Non è necessario risciacquare



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

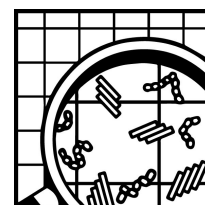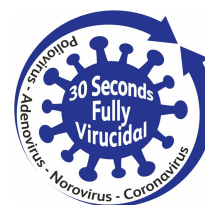

Oxivir Excel Foam CE

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido chiaro
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	0.55
pH (in uso):	< ≈ 2
Peso specifico (20°C):	1.000
Periodo di validità:	24 mesi

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Manipolare seguendo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non mescolare con altri prodotti. Conservare nei contenitori originali chiusi, al riparo da temperature estreme. Il prodotto non è destinato a essere riutilizzato. Solo per utenti professionali/specialisti.

Attenzione

Non riutilizzare. Non destinato all'uso su dispositivi medici invasivi. Il prodotto non è destinato all'uso sulla pelle umana. Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare acqua calda. Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua o agli acidi. Si sconsigliano usi diversi da quelli indicati. Il prodotto non è destinato a dispositivi medici invasivi. Non è destinato all'uso su dializzatori e tubi per dialisi e strumenti critici (chirurgici) che penetrano nei tessuti o invadono il flusso sanguigno. Non è destinato all'uso su strumenti semicritici che entrano in contatto diretto con membrane mucose intatte e devono essere disinfettati ad alto livello. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. Lavare accuratamente il viso, le mani e la pelle esposta dopo la manipolazione. Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Utilizzare solo con una ventilazione adeguata.

Reagisce con le sostanze ossidabili. Si conserva per 2 anni dalla data di produzione.

In caso di incidenti gravi relativi all'uso di Oxivir Excel Foam CE, l'utente deve segnalarli a Diversey Europe Operations BV e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Compatibilità prodotto

Non miscelare con altro prodotti. Non utilizzare acqua tiepida. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi, Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Oxivir Excel Foam è adatto all'uso sulle più comuni superfici.

Dati microbiologici

L'efficacia di Oxivir Excel Foam è stata comprovata dai più recenti test internazionali:

Attività	Test EN (condizioni di sporco)	Tempo di contatto
Battericida	EN13727	30 sec
Battericida	EN1276	1 min
Lieviticida	EN16615	1 min
Virucida	EN14476	30 sec

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche. Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

Oxivir Excel CE ha ottenuto la certificazione come dispositivo medico classe IIa, per dispositivi medici non invasivi.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.10/03/2025 it-IT (K00401)